

1. Wurzelkanalaufbereitung:

Bevor Sie MTA-FILLAPEX in den Wurzelkanal applizieren, muss dieser entsprechend der von Ihnen angewendeten Aufbereitungstechnik aufbereitet, gereinigt und getrocknet werden.

2. Anmischen:

Das Anmischen der zwei Pasten erfolgt automatisch durch die mit der Spritze verwendete Applikationsspitze. Verwenden Sie das Material zügig nach Betätigen der Spritze.

3. Applikation:

Verwenden Sie MTA-FILLAPEX mit Guttapercha- oder Silberstiften. Überziehen Sie diese mit einer dünnen Schicht des Materials und geben Sie MTA-FILLAPEX entsprechend der von Ihnen angewendeten Wurzelfülltechnik in den Wurzelkanal. MTA-FILLAPEX kann mit Lentulos verwendet werden oder auch direkt mit Hilfe der Applikationsspritze in den Wurzelkanal gegeben werden.

4. Revision:

Gehen Sie zur Entfernung der Wurzelfüllung wie beim üblichen Revisionsverfahren zur Entfernung von Guttaperchawurzelfüllungen vor.

5. Arbeitszeit insgesamt:

Ca.30 Minuten

6. Zeit bis zur vollständigen Aushärtung:

Mindestens 120 Minuten.

Die Vorteile zusammengefasst:

- Selbstmischende Applikationsspritze
- Pastensystem
- Hervorragende Radioopazität
- Einfaches Handling
- Schnelle Anwendung erlaubt, mehr Zeit in eine optimale Wurzelkanalaufbereitung zu investieren
- MTA-FILLAPEX ist der einzige Sealer, der eine Regeneration des Zahnzementes bewirkt